


INSTRUKCIJA

Siekalu "pūlinga" testa veikšana
izglītības iestadēs

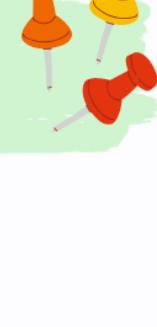

KOMPLEKTA SATURS

spirta salvetes
vai dezinfekcijas
līdzeklis




skolēnu saraksts

stobriņš



transportēšanas
maiss

parauga nēmšanas
kociņu tamponi

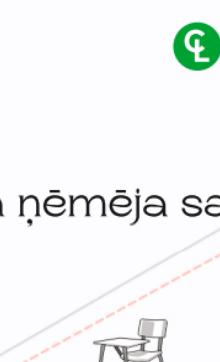

cimdi



Kas ir PŪLINGS

metode, kurā paraugi no visiem klasē esošajiem tiek apvienoti vienā paraugā, kas pēc tam tiek testēts laboratorijā.



Testa nēmēja satiksmes plūsma



Testēšanas soli



1.

SKOLOTĀJS UZVELK GUMIJAS CIMDUS.



2.

SKOLOTĀJS KATRAM IZDOT SPIRTA
SALVETI UN VATES TAMPONU.



3.


SKOLĒNU ROKU DEZINFEKCJĀ.

Nomazgājet rokas vai nodezinfecejiet, izmantojot spirta
salveti.



4. SKOLNIEKS ATVER TAMPONU.

Atveriet tampona lepakojumu, izņemiet
nēmšanas kociņu aiz roktura.
Uzmanīgi neaiztikti tampona daļu tam
paredzētājā vietā, lai var uzskrūvēt stobriņā korķītī.

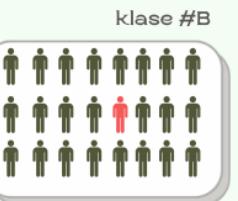

5. MATERIĀLA PANEMŠANA.

Ievadiet nēmšanas kociņa tamponu
mutes dobumā un paturiet aiz valgīm 20 sekundes.

Tad vairākas reizes ar rotējošam kustībām virpiniet
kociņu gar mutes dobuma gļotādu, pieskaroties mēlei,
zobiem vai smaganām.

Skolotājs savāc visus tamponus,
ievietojot materiālu stobriņā.

Ievietojet kociņu ar vates tamponu uz leju transportēšanas
stobriņā, nolaiziet nēmšanas kociņa nevajadzīgo daļu tam
paredzētājā vietā, lai var uzskrūvēt stobriņā korķītī.

Kociņiem laušanas vieta var atšķirties.

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


6.

SKOLOTĀJS SAVĀC VISUS TAMPONUS,
IEVIETOJOT MATERIĀLU STOBRIŅĀ.

Ievietojet kociņu ar vates tamponu uz leju transportēšanas
stobriņā, nolaiziet nēmšanas kociņa nevajadzīgo daļu tam
paredzētājā vietā, lai var uzskrūvēt stobriņā korķītī.

Kociņiem laušanas vieta var atšķirties.



7.

AIZSKRŪVĒ STOBRIŅU.

Kad visi tamponi ir savākti un ielikti stobriņā, to
aizsrrūvē un ievieto atpakaļ biadrošības maisā.

8. SARAKSTA NOFORMĒJUMS

Skolotājs pārbauda skolēnu sarakstu un skaidri markē
(IZSVĪTRO) tos skolēnus, kas testēšanas rezēz nepiedalās.

Ja, skolnieks ir skolā, bet nav sarakstā, skaļi paraugu kā aizpildit sarakstu ar
papildus skolēniem.

#0001

Testa rezultāts

NEGATĪVS

(apvienotā parauga testēšana)

#0001

Testa rezultāts

POZITĪVS

(apvienotā parauga testēšana)

-skolēni turpina mācības klātienē

-skola un skolēni saņem paziņojumu par
nepieciešamību nodot individuālu paraugu
katram testējamam

-visi testētie ievēro mājas karantīnu l4 dienas

Izglītības iestāde

klase #A

klase #B

1.solis

skolēni klasē patstāvīgi savāc
materiālu un ievieto vienā
stobriņā

2.solis

Parņemtais materiāls tālāk tiek testēts
laboratorijā.

3.solis

#0001

Testa rezultāts

NEGATĪVS

(apvienotā parauga testēšana)

#0001

Testa rezultāts

POZITĪVS

(apvienotā parauga testēšana)

-skolēni turpina mācības klātienē

-skola un skolēni saņem paziņojumu par
nepieciešamību nodot individuālu paraugu
katram testējamam

-visi testētie ievēro mājas karantīnu l4 dienas

